



TENA SMARTCARE IDENTIFI™



LA CLÉ POUR DES ÉVALUATIONS PRÉCISES DE LA CONTINENCE

NOUVEAU



TENA SmartCare Identifi™ est une solution de santé numérique conçue pour faciliter l'évaluation de la continence. Les résultats sont ensuite utilisés pour créer des plans de soins individualisés, avec des produits, des protocoles et des objectifs adaptés pour promouvoir la continence et soutenir l'autonomie.

Un meilleur soin pour tous.

POUR UNE COMPRÉHENSION DES BESOINS DES RÉSIDENTS PLUS COMPLÈTE

La population vieillit. La demande en soins augmente avec ce vieillissement. Cela exerce une pression sur les soignants et les établissements de soins car ils n'ont souvent pas le temps ou les ressources nécessaires pour prendre soin des personnes concernées.

Pour répondre aux besoins d'une population vieillissante, nous devons aborder les soins de manière plus réfléchie. Les solutions de santé numériques soutiennent les soignants en libérant du temps et des ressources précieuses, et elles nous assurent que davantage de personnes reçoivent le niveau de soins dont elles ont besoin.

TENA SmartCare Identifi™ est bénéfique pour tous

TENA SmartCare Identifi™ est une solution de santé numérique conçue pour aider les soignants à effectuer des évaluations précises de la continence et à mieux comprendre les défis individuels auxquels sont confrontées les personnes souffrant d'incontinence.

En utilisant TENA SmartCare Identifi™ dans le cadre de votre évaluation de la continence, les personnes dont vous vous occupez bénéficieront d'un niveau plus élevé de soins individualisés. Avec TENA SmartCare Identifi™, votre établissement allie bien-être des résidents et satisfaction des soignants, grâce à une utilisation plus efficace du temps et des ressources.



DES INFORMATIONS PERTINENTES POUR DES SOINS ADAPTÉS

TENA SmartCare Identifi™ permet de suivre discrètement les habitudes de miction du résident sur une période continue de 72 heures.


Il génère ainsi un rapport d'évaluation détaillé propre à chaque personne.

Les informations contenues dans le rapport d'évaluation peuvent ensuite être utilisées pour créer un plan de soins individualisé, qui comprend :

- Des passages aux toilettes à des moments adaptés
- Le bon type de produit , le bon niveau d'absorption et la bonne taille de produits pour l'incontinence
- Des produits d'hygiène et soins adaptés
- Des objectifs et des activités qui favorisent la continence et l'autonomie

Les plans de soins individualisés peuvent également inclure TENA SmartCare Change Indicator™, une solution de santé numérique qui avertit les soignants lorsqu'il est temps de changer les produits absorbants. Cela réduit les contrôles manuels fréquents, qui perturbent la journée et interrompent le sommeil.

TENA SmartCare Identifi™ est validé cliniquement et peut offrir les bénéfices suivants :

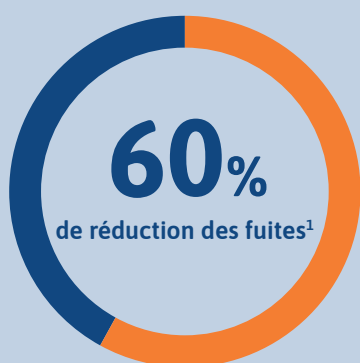

1. Kolmans, A.L., Koopmans, N., & Gansewinkel, H. Van. (2022). Giving direction together in elderly care in Central Brabant, NL. Publié en décembre 2022.

2. « L'empreinte carbone à l'utilisation » comprend l'empreinte carbone des produits absorbants et de la blanchisserie due aux fuites, dans la fourniture de soins d'hygiène et de protection. Le résultat est basé sur un essai clinique (données internes) et une évaluation du cycle de vie réalisée par Essity, évalués par un tiers. Les hypothèses sur les fuites diurnes et nocturnes, donnant différents volumes de blanchisserie, sont basées sur les données internes d'Essity. L'impact environnemental des produits absorbants est basé sur l'achat des matières premières, la production, le transport et le traitement des déchets.

FONCTIONNEMENT DE TENA SMARTCARE IDENTIFI™

1. Début de l'évaluation

Pour commencer l'évaluation, activez le boîtier enregistreur sur la plateforme web TENA SmartCare Identifi™. Une fois le boîtier activé, la surveillance peut commencer pour les 72 heures.




2. Suivi

Pendant l'évaluation, les résidents portent des changes connectés absorbants au lieu de leur protection habituelle. Le change connecté TENA est confortable, facile à enfiler et à enlever et est remplacé en fonction des protocoles de soins habituelles du résident.

3. Données

Les informations sont recueillies par le boîtier enregistreur Tena SmartCare Identifi™, qui est solidement fixé au change connecté. Le boîtier est retiré et remis en place à chaque changement de produit. Des événements tels que les fuites, selles etc, doivent également être consignés dans un journal mictionnel pendant cette période.

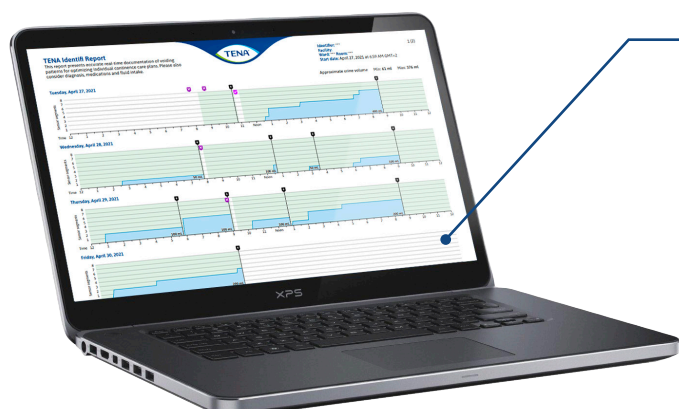

4. Rapport

Une fois l'évaluation de 72 heures terminée, arrêtez le boîtier enregistreur sur le portail web et ajoutez manuellement tous les événements au journal. Vous pouvez à présent générer un rapport d'évaluation qui peut être utilisé pour créer un plan individualisé de soins de la continence. TENA SmartCare Identifi™ peut également être utilisé pour créer des rapports de suivi qui montrent l'impact des plans de soins créés.

NOUVEAU



TENA Flex **POUR PLUS DE CONFORT** **ET DE PROTECTION PENDANT** **LES ÉVALUATIONS DE LA CONTINENCE**

Lors des évaluations de la continence, nous souhaitons offrir le meilleur confort et la meilleure protection possibles au plus grand nombre. Pour cette raison, nous avons créé le change connecté TENA Flex, une nouvelle version unique de l'un de nos produits les plus efficaces et les plus populaires, spécialement conçue pour être utilisée lors des évaluations de la continence. Avec l'ajout du change connecté TENA Flex, nous pouvons garantir que davantage de personnes bénéficient d'évaluations précises de la continence et reçoivent l'aide et le soutien dont elles ont besoin.

Bénéfices du change connecté TENA Flex

- S'adapte facilement aux différentes morphologies
- Peut être changé debout ou couché
- Ergonomique et facile à utiliser pour les soignants
- Offre confort et sécurité contre les fuites
- Le TENA Flex standard est déjà utilisé dans de nombreux établissements de soins, il n'est donc pas nécessaire de modifier les protocoles de soins

Gamme des changes connectés TENA



Change connecté TENA Flex



Change connecté TENA Pants



Change connecté TENA Slip

UNE SOLUTION NUMÉRIQUE BÉNÉFIQUE POUR TOUS

Les plans de soins individualisés créés avec l'aide de TENA SmartCare Identifi™ ont non seulement fait leurs preuves pour offrir une meilleure qualité de vie aux bénéficiaires, mais ils peuvent également contribuer à créer une plus grande valeur pour votre établissement de soins, allant d'une plus grande satisfaction professionnelle pour les soignants à une utilisation plus efficace du temps et des ressources. Cette solution est également plus favorable à l'environnement.



Bénéfices pour les résidents¹

- Réduction de la vérification des produits de 25,9 %
- Réduction des fuites de 60,7 %
- Absorption optimisée pour 4 utilisateurs sur 10
- Augmentation de la réussite des passages aux toilettes de 2,1 %
- Réduction de l'échec des passages aux toilettes de 40,7 %



Bénéfices pour les soignants¹

- Réduction des changements produits de 16,7 %
- Une meilleure efficacité permet d'économiser
 - 16,7 minutes par résident et par jour
 - 101 heures par résident et par an
- Meilleure satisfaction du personnel



Bénéfices pour votre budget¹

- Réduction du coût des produits de 296 EUR par résident et par an
- Réduction des frais de blanchisserie de 308 EUR par résident et par an
- Réduction des frais de personnel de 3 198 EUR par résident et par an
- Économie totale de 3 803 EUR par résident et par an

1. Kolmans, A.L., Koopmans, N., & Gansewinkel, H. Van. (2022). Giving direction together in elderly care in Central Brabant, NL. Publié en décembre 2022.

2. FQ ARCTICC study on TENA SmartCare Identifi by University of Alberta, Canada, 2018 - données internes, soumises pour évaluation par des pairs


ÉMISSIONS DE CO₂ PLUS FAIBLES AVEC UNE NORME DE SOINS PLUS ÉLEVÉE

Une approche plus durable des soins de la continence

Chez TENA, nous souhaitons favoriser le développement durable des établissements de soins. Combiner une approche de soins individualisée avec les produits absorbants TENA, les outils TENA et les solutions numériques TENA SmartCare peut faire une réelle différence en matière de soins durables de la continence.

L'utilisation de TENA SmartCare Identifi™ dans le cadre de vos évaluations de la continence permettra de s'assurer que vos résidents disposent des produits adaptés à leurs besoins individuels. Cela réduira les fuites et le niveau d'absorption et optimisera l'utilisation des produits, ce qui permet de réduire la consommation de produits, les déchets et la blanchisserie, tout cela pouvant contribuer à réduire l'empreinte carbone lors de l'utilisation¹.

TENA SmartCare Identifi™ peut vous aider à réduire votre empreinte carbone

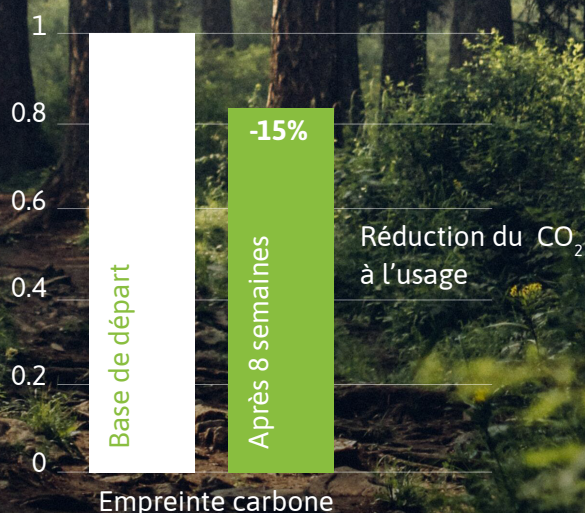

Les calculs des émissions de CO₂ lors de l'utilisation sont effectués par Essity, mais examinés par un tiers, conformément aux exigences de la norme ISO 14044.

1. « Empreinte carbone à l'utilisation » comprend l'empreinte carbone des produits absorbants et de la blanchisserie due aux fuites, dans la fourniture de soins de propreté et de protection. Le résultat est basé sur un essai clinique (données internes) et une évaluation du cycle de vie réalisée par Essity et revue par un tiers, qui indiquent une réduction de 15 %. Les hypothèses sur les fuites diurnes et nocturnes, qui génèrent différents volumes de blanchisserie, sont basées sur les données internes d'Essity. L'impact environnemental des produits absorbants est basé sur l'achat des matières premières, la production, le transport et le traitement des déchets.



Nous proposons une offre complète qui comprend des produits absorbants et soins de la peau ProSkin, des outils d'accompagnement et de formation, ainsi que nos dernières solutions numériques TENA SmartCare - TENA SmartCare Identifi™ et TENA SmartCare Change Indicator™.

Cette gamme unique est spécifiquement conçue pour optimiser le parcours de soins de la continence et améliorer encore l'individualisation des soins. La combinaison de notre gamme et d'une approche de soins individualisée offrira la plus grande valeur aux résidents, aux soignants, aux établissements de soins et à l'environnement.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre responsable commercial local.

TENA. Un meilleur soin pour tous

TENA est une marque déposée d'Essity Hygiene and Health AB.

Les protections pour fuites urinaires TENA® sont des dispositifs médicaux de classe CE I, non stérile. Dispositifs non pris en charge par l'assurance maladie.

Fabricant légal : Essity Hygiene and Health AB

Essity France - Capital social - 50 374 272,18 Euros - RCS Bobigny 509 395 109

Siège social : 151 boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine

Février 2024 Réf. : 040120241.

